



Nettoyant antimicrobien pour la peau et les plaies
Pour hôpitaux et professionnels de la santé

Santé Canada Licence # 97043

Références de commande :

- Référence catalogue 4004C Capsule distributrice 4 oz (118.5 ml), 24 par boîte
- Référence catalogue 4004SC Pulvérisateur 4 oz (118.5 ml), 12 par boîte
- Référence catalogue 4008C Capsule distributrice 8 oz (237 ml), 12 par boîte
- Référence catalogue 4008SC Pulvérisateur 8 oz (237 ml), 12 par boîte
- Référence catalogue 4008TC Pulvérisateur à gâchette 8 oz (237 ml), 12 par boîte
- Référence catalogue 4012SC Pulvérisateur à gâchette 12 oz (355 ml), 12 par boîte
- Référence catalogue 4016C Capsule distributrice 15 oz (443 ml), 12 par boîte

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le nettoyant antimicrobien Anasept^{MD} pour la peau et les plaies est un liquide isotonique transparent facilitant l'enlèvement mécanique des débris sur le site nettoyé, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large. Le nettoyant Anasept^{MD} a aussi une action empêchant la croissance de diverses bactéries, notamment *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, ainsi que les souches résistantes aux antibiotiques (p. ex. *Escherichia coli* résistant au carbapénem (ERC), *Entérocooccus faecalis* résistants à la vancomycine (ERV) et *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) souvent présentes dans les plaies, de même que les microchampignons (p. ex. *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, et *Candida auris*).

INDICATIONS :

Vente libre : Le nettoyant antimicrobien Anasept^{MD} pour la peau et les plaies est commercialisé en vente libre pour le nettoyage et l'enlèvement mécanique des saletés, des débris et des corps étrangers sur les écorchures, les lacerations, les irritations mineures, les coupures, les sites de sortie et la peau intacte.

Usage professionnel : Le nettoyant antimicrobien Anasept^{MD} pour la peau et les plaies peut être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé pour l'enlèvement des microorganismes et d'autres corps étrangers sur diverses plaies, notamment les ulcères de pression I-IV, les ulcères de pied diabétique, les plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

MODE D'EMPLOI :

- Peau :**
 - 1) Pulvériser le produit sur la zone à traiter ou appliquer une gaze imbibée de produit
 - 2) Laisser sécher à l'air libre ou conserver comme préparation humide
- Plaies :**
 - 1) Pulvériser directement ou appliquer une gaze imbibée sur la plaie.
 - 2) Éviter la formation de micro-flaques et recouvrir avec un pansement approprié.
 - 3) Répéter au besoin.

**CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU'À 25 °C (77 °F).
NE PAS CONGELER.**

Autres informations : Le nettoyant Anasept^{MD} est sans danger pour l'environnement. Le nettoyant Anasept peut être jeté dans un lavabo ou un système d'égout.

SANS LATEX.

RÉSERVÉ À UN USAGE EXTERNE. NON CONÇU POUR UN USAGE OPHTHALMIQUE.



Fabriqué par : Argentum Medical, LLC.
2571 Kaneville Court
Geneva, IL 60134
(888) 551-0188
www.anacapa-tech.net

Anasept^{MD} est une marque déposée appartenant à Argentum Medical, LLC.

Produit fabriqué aux États-Unis
LC-CA-IFU-ANA-CLN Rev A

APPROVAL LABEL DICR# 20-085
 Doc# LC-CA-IFU-ANA-Rev# A
 N-CLN
 Date 6/28/23
 Date 06/24/23
 Date 28 JUNE 2023
 Operations Quality Assurance
 Customer / Other

JUN 28 2023