



Solution Antimicrobienne D'irrigation De Plaie  
Réservé À Un Usage Professionnel/Hospitalier

**N° de permis Sante' Canada : 97053**

Référence Catalogue **4160IC**, Contenu Net : 473 ml (16 oz)

**DESCRIPTION DU PRODUIT :**

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept<sup>MD</sup> est un liquide isotonique transparent facilitant l'enlèvement mécanique des débris sur le site nettoyé, tout en appliquant 0,057 % d'hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large sur le site au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative. La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept<sup>MD</sup> empêche la croissance de nombreuses bactéries, notamment : *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, ainsi que les souches résistantes aux antibiotiques (p. ex. *Escherichia coli* résistant au carbapénem (ERC), *Entérocooccus faecalis* résistants à la vancomycine (ERV) et *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) souvent présentes dans les plaies, de même que les microchampignons (p. ex. *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, et *Candida auris*).

**INDICATIONS :**

La solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept<sup>MD</sup> a été conçue pour une utilisation sous la supervision d'un professionnel de la santé pour le nettoyage des microorganismes et autres corps étrangers sur les plaies, notamment : ulcères de pression de stade I-IV, ulcères de pied diabétique, plaies post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de greffe et les plaies de donneur.

**MODE D'EMPLOI : CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN ADAPTATEUR POINTU VENTILÉ**

1. Enlever le pare-poussière sur l'embout.
2. Insérer la pointe ventilée.
3. Tirer la sangle vers le haut et accrocher sur une tige verticale ou sur un appareil de traitement de plaie par pression négative.
4. Appliquer la solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept<sup>MD</sup> au moyen d'un appareil de traitement de plaie par pression négative (suivre les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil).
5. Ne pas rincer.
6. Répéter au besoin.

**SANS LATEX.**

**AVERTISSEMENT :** Réservé à un usage externe. Ne doit pas être injecté ni appliqué sur les yeux.

**Conserver à température ambiante jusqu'à 25 °C (77 °F).**

**Ne pas congeler.**

**ÉLIMINATION :** Les produits Anasept<sup>MD</sup> sont sans danger pour l'environnement et peuvent être jetés dans un lavabo ou un système d'égout.



Fabriqué par : Argentum Medical, LLC.  
2571 Kaneville Court  
Geneva, IL 60134  
(888) 551-0188  
www.anacapa-tech.net

Anasept<sup>MD</sup> est une marque déposée appartenant à Argentum Medical, LLC.  
Solution antimicrobienne d'irrigation de plaie Anasept<sup>MD</sup>, notice en français LC-CA-IFU-ANA-IRI Rev A

APPROVAL LABEL DICR# 23-085  
Doc# LC-CA-IFU-ANA-IRI Rev# A  
Date 07/28/23  
Date 28 June 2023  
RP Operations JUN 28 2023  
Quality Assurance  
Customer / Other